

El Braun ThermoScan® Pro 4000




Qué afecta a la precisión

El rango normal de temperatura varía de una persona a otra y puede estar influenciado por muchos factores

Factor	Afecta la precisión	
	Sí	No
Colocación incorrecta de la sonda	✓	
La sonda no tiene ninguna cubierta	✓	
La sonda tiene una cubierta usada	✓	
Temperatura ambiente	✓	
Lentes sucias o desconchadas	✓	
Audífono	✓	
Está tumbado sobre una almohada	✓	
Cerumen (cera del oído)		✓
Otitis media (infección del oído)		✓
Tubos de timpanostomía		✓

Funcionamiento y técnica

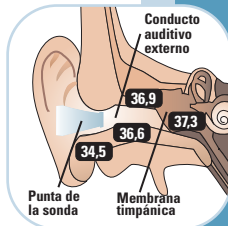

1. Retire el termómetro del alojamiento y acople una cubierta para la sonda. El dispositivo se encenderá.
2. Espere por el pitido que indica que está "listo" y coloque bien la sonda en el conducto auditivo externo. La colocación correcta de la sonda es esencial para obtener lecturas precisas.
3. Presione y suelte el botón de Inicio. El termómetro pitará una vez más. La luz verde ExacTemp situada encima del botón de Inicio parpadeará, indicando la colocación correcta de la sonda.
4. Un pitido largo y una luz verde fija ExacTemp señalarán el final de la medición con la colocación correcta de la sonda.
5. Si la sonda no está posicionada de forma estable mientras se mide la temperatura, el dispositivo pita, la luz verde ExacTemp desaparece y se visualiza un error de posición (POS).
6. Presione el botón I/O para recuperar la última temperatura.
7. Para cambiar la escala de temperatura: Con el dispositivo apagado, pulse y mantenga pulsado el botón I/O durante 5 segundos aproximadamente. Siga presionando hasta que aparezca en la pantalla la escala deseada.

Mensajes de error y soluciones



No hay ninguna cubierta acoplada a la sonda: Coloque una cubierta nueva y limpia en la sonda.




(POS = Error de posición) El monitor de infrarrojos no puede encontrar un equilibrio de temperatura y no permite la medición. Borre la pantalla presionando una vez más el botón de "Inicio": Asegúrese que la colocación de la sonda es correcta y permanece estable.




La temperatura ambiente no está dentro del rango operativo permitido de 10-40 °C o cambia rápidamente: Deje el termómetro 30 minutos en un cuarto donde la temperatura esté entre 10 y 40 °C.



Error del sistema: Espere 1 minuto hasta que el termómetro se apague automáticamente; a continuación, enciéndalo de nuevo. **Si el error continúa,** reinicie el termómetro retirando las baterías y volviéndolas a colocar. **Si todavía sigue el error,** comuníquese con Welch Allyn.

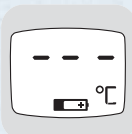

La carga de las baterías está baja, pero el termómetro todavía funcionará correctamente: Inserte baterías nuevas.

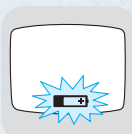

La carga de la batería es demasiado baja para tomar mediciones correctas de la temperatura: Inserte baterías nuevas.