


Temperatura timpánica

con el Braun ThermoScan® PRO 4000

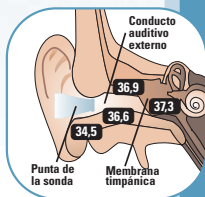

1. Retire el termómetro del alojamiento y acople una cubierta para la sonda. El dispositivo se encenderá.
2. Espere por el pitido que indica que está "listo" y coloque bien la sonda en el conducto auditivo externo. La colocación correcta de la sonda es esencial para obtener lecturas precisas.
3. Presione y suelte el botón de Inicio. El termómetro pitará una vez más. La luz verde ExacTemp situada encima del botón de Inicio parpadeará, indicando la colocación correcta de la sonda.
4. Un pitido largo y una luz verde fija ExacTemp señalarán el final de la medición con la colocación correcta de la sonda.
5. Si la sonda no está posicionada de forma estable mientras se mide la temperatura, el dispositivo pita, la luz verde ExacTemp desaparece y se visualiza un error de posición (POS).
6. Presione el botón I/O para recuperar la última temperatura.
7. Para cambiar la escala de temperatura: Con el dispositivo apagado, pulse y mantenga pulsado el botón I/O durante 5 segundos aproximadamente. Siga presionando hasta que aparezca en la pantalla la escala deseada



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Consejos para medir la temperatura timpánica con el Braun ThermoScan® PRO 4000

1. Coloque siempre una cubierta para sonda. Si el dispositivo está colocado en el conducto auditivo externo sin una cubierta, las lentes deben limpiarse antes de volverlo a utilizar.
2. Limpie las lentes con un algodón y alcohol y espere 5 minutos para que se sequen completamente.
3. Utilice solamente cubiertas para sondas Braun ThermoScan.
4. Los siguientes factores interferirán con lecturas precisas de temperatura:
 - > Colocación incorrecta de la sonda
 - > Lentes de la sonda están sucias, mojadas o dañadas
 - > Falta la cubierta de la sonda o la cubierta existente está usada
 - > Temperatura ambiente
 - > Estar tumbado sobre una almohada
 - > Audífono.
5. Los siguientes factores no interferirán con lecturas precisas de temperatura:
 - > Cerumen (cera del oído)
 - > Otitis media (infección del oído)
 - > Tubos de timpanostomía.

Welch Allyn Iberia,
General Varela 35, Planta 2ª, oficina 10-11,
28020 Madrid, España
Tel: +34 91 2990376 Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.com

BRAUN

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™